

FÜR DIE HYGIENISCHE UND SICHERE ENTNAHME VON URINPROBEN



IVD

URINBECHER mit integrierter Transfereinheit

Der Urinbecher mit integrierter Transfereinheit ermöglicht es Ihnen, Urinproben sicher zu sammeln und an den gewünschten Ort zu transportieren. Dank der integrierten Transfereinheit ist der Probentransfer vom Becher in ein evakuiertes Röhrchen einfach, schnell und hygienisch.

Das optimierte Gewinde des Urinbechers ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen. Zudem verhindert eine Stabilisierungslippe ein Überschauben und sorgt für erhöhte Stabilität.

- / **Tiefsitzende Transfereinheit zur Reduzierung des Risikos von Nadelstichverletzungen.**
- / **Großverpackung zur Reduzierung von Abfall und damit verbundenen Kosten.**

NEUES ETIKETTENDSIGN.

Das perforierte Etikett dient als Siegel für die Sterilität und zeigt visuell an, ob das Produkt vor dem Gebrauch bereits geöffnet wurde.



Urinbecher mit integrierter Transfereinheit

lose verpackt

Art. Nr.	Volumen	Verschlussart	Deckelfarbe	Sterilität	UVP / VP [Stk.]
724321	100 ml	Schraubverschluss	gelb	steril	- / 300
724322	100 ml	Schraubverschluss	gelb	unsteril	- / 300

EMPFOHLENE HANDHABUNG

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung unter www.gbo.com.



1

Wenn mehr als ein Röhrchen
befüllt werden soll, lösen Sie
den Deckel etwas mehr als eine
Vierteldrehung, um den Druck
im Becher zu normalisieren.



2

Ziehen Sie das
Sicherheitsetikett ab.



3

Röhrchen anstecken und
warten, bis es vollständig
gefüllt ist. Entnehmen Sie
das Röhrchen anschließend.



4

Deckel schließen und
Sicherheitsetikett
wieder anbringen.