



DER SUPER EINFACHE UND SUPER PRAKTISCHE EINWEGVENENSTAUER



NOT MADE
with natural
rubber latex

VACUETTE® SUPER-T Einwegvenenstauer

Das Material besteht aus Silikon und ist leicht gepudert. Es ist weich und angenehm auf der Haut und gleichzeitig praktisch reißfest. Der Venenstauer enthält keine Komponenten des Weichmachers DEHP oder aus trockenem Naturkautschuk, wodurch Hautreizungen vermieden werden.

Der Venenstauer lässt sich schnell und einfach mit einer Hand lösen, so dass die andere Hand für eine reibungslose Venenpunktion frei bleibt.

- / Einmalverwendung
- / Einfaches Fixieren und einhändiges Lösen
- / Reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination
- / Latex-frei und non-DEHP
- / Praktische platzsparende Entnahmebox

WICHTIG ZU WISSEN:

- / Einwegvenenstauer wie Super-T tragen zur Reduktion von nosokomialen Infektionen z.B. durch MRSA bei.
- / Der Super-T bietet Komfort und Sicherheit, um die Venenpunktion sowohl für den Patienten als auch für den Anwender zu erleichtern.



PRODUKT ÜBERSICHT

FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND/ODER
MUSTERBESTELLUNGEN BESUCHEN SIE UNSERE
WEBSITE ODER KONTAKTIEREN SIE UNS.

VACUETTE® Super-T Einwegvenenstauer

Art. Nr.	Länge	UVP / VP [Stk.]
840056	450 mm	80 / 160

EMPFOHLENE HANDHABUNG

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung unter www.gbo.com.



1

Venenstauer in
Position bringen.



2

Das gegenüberliegende Ende
durch den Schlitz ziehen.



3

Festziehen bis die nötige
Spannung erreicht ist.



4

Der Venenstauer ist in
dieser Position fixiert.



5

Am kürzeren Ende ziehen,
um ihn zu lösen.