

making a difference



WIR SORGEN FÜR IHRE SICHERHEIT

VACUETTE®

Sicherheitsprodukte

Greiner Bio-One bietet eine breite Palette an Sicherheitsprodukten für unterschiedliche Anforderungen.



greiner
BIO-ONE

Die Folgen einer Nadelstichverletzung können weitreichende Auswirkungen auf die berufliche und persönliche Situation des Betroffenen und seine Familie haben.



Eine der wirksamsten Möglichkeiten, sich zu schützen, ist die Verwendung von Sicherheitsprodukten.

NADELSTICHVERLETZUNGEN WAREN GESTERN

Eine Vielzahl aller berufsbedingt erworbenen Infektionskrankheiten im Gesundheitswesen sind auf Stichverletzungen zurückzuführen. Dabei bergen Nadelstichverletzungen das bei weitem höchste Infektionsrisiko.

Mehr als 50 % aller registrierten Fälle betreffen das Pflegepersonal, gefolgt von Ärzten und Labormitarbeitern.

Daraus sollte jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass Nadelstichverletzungen ein unvermeidliches Berufsrisiko darstellen. Durch die korrekte Verwendung von VACUETTE® Sicherheitsprodukten kann diese Gefahr nahezu ausgeschlossen werden.

VACUETTE® Sicherheitsprodukte erfüllen die EU-Richtlinie (EU 2010/32).

WIR SORGEN FÜR IHRE SICHERHEIT.

- / Breite Palette an Sicherheitsprodukten.
- / Unterschiedliche Produkte je nach Anwendungsbereich.
- / Für jede Situation das passende Sicherheitsprodukt.

FÜR JEDE SITUATION DAS PASSENDE SICHERHEITSPRODUKT

Wir bieten eine umfangreiche Palette an Sicherheitsprodukten an, so dass die am besten geeigneten Produkte für jeden Markt und Kunden ausgewählt werden können. Bei Greiner Bio-One finden Sie das optimale Produkt für Ihre individuellen Bedürfnisse sowie jedes Sicherheitslevel:

Vom einfachen Sicherheitsprodukt bis hin zum Premium Produkt.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über unsere Produkte, mit denen Sie sich bestmöglich vor Nadelstichverletzungen schützen können.



Standard-Venenpunktion.

Für die tägliche Blutentnahme empfehlen wir die Verwendung unseres VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS.

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS



Schwierige Venenverhältnisse.

All unsere Sicherheitsblutentnahmesets sind auch für Patienten mit schwierigen Venenverhältnissen geeignet. Unser Premiumprodukt VACUETTE® EVOPROTECT sorgt für eine besonders sanfte Blutentnahme.

VACUETTE® EVOPROTECT oder Sicherheitsblutentnahmeset oder VACUETTE® Sicherheitsset mit Flügeln (21G oder 23G)



Blutkulturen.


Für die Entnahme von Blutkulturen können wir Ihnen das Sicherheitsblutentnahmeset mit vormontiertem Blutkulturhalter empfehlen.

Sicherheitsblutentnahmeset mit Blutkulturhalter (21G oder 23G)

SICHERHEIT FÜR JEDES LEVEL und individuelle Bedürfnisse

DIE PRODUKTOPTIONEN VON GREINER BIO-ONE

In unserem Sortiment finden Sie das passende Produkt für jedes Sicherheitslevel. Von Produkten ohne Sicherheitsmechanismus bis hin zu Premium Sicherheitsprodukten bieten wir Ihnen das Produkt für Ihre individuellen Bedürfnisse.

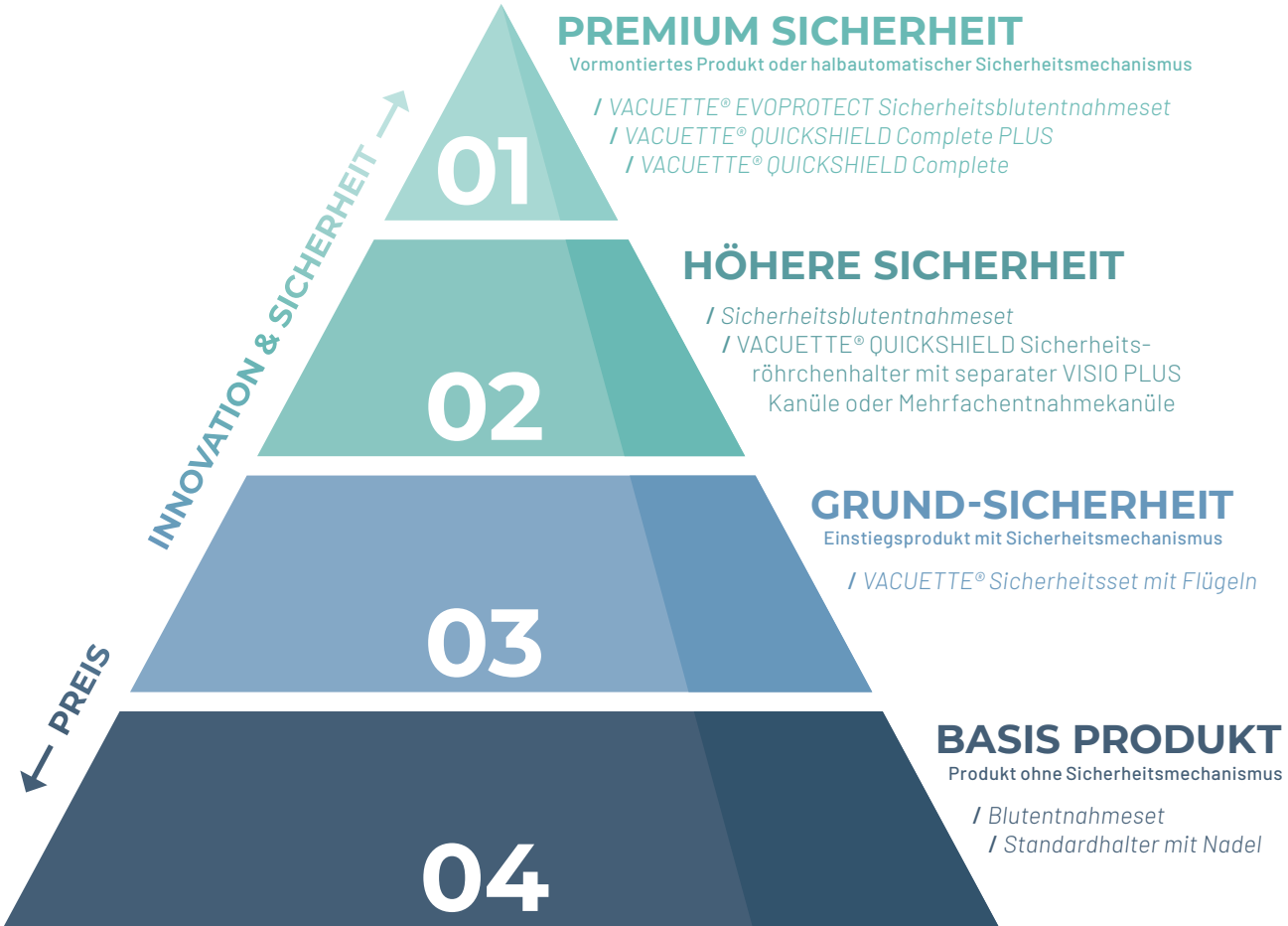

SCHNELL UND EINFACH DAS RICHTIGE SICHERHEITSPRODUKT FINDEN

In der folgenden Übersicht erkennen Sie auf einen Blick, welche Features Ihnen das ausgewählte Produkt bietet und auf welchem Sicherheitslevel Sie sich damit befinden. Dies ermöglicht Ihnen die bestmögliche Auswahl für Ihre Bedürfnisse.

		Sicherheitsprodukt	Halbautomatischer Rückzug der Nadel	Aktivierung wenn Nadel in der Vene	Einhändige Aktivierung	Vormontiertes Produkt	Sichtfenster zur Anzeige des Blutflusses	Beliebige Positionierung des Sicherheitsschildes	Blutentnahme & Infusion mit demselben Set	Extra dünnwandige Nadel (verbesserte Durchflussrate)	Mit minimalem Memory-Effekt	Enthält keinen natürlichen Latexgummi	ohne DEHP
01	VACUETTE® EVOPROTECT Sicherheitsblutentnahmeset	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓*	✓	✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS	✓			✓	✓	✓					✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete	✓			✓	✓	✓					✓	✓
02	Sicherheitsblutentnahmeset	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter mit VISIO PLUS Kanüle	✓			✓		✓	✓				✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter mit Mehrfachentnahmekanüle	✓			✓			✓				✓	✓
03	VACUETTE® Sicherheitsset mit Flügeln	✓			✓	✓						✓	✓
04	Blutentnahmeset					✓					✓	✓	
	Standardhalter mit Nadel						✓					✓	✓

* 21G und 23G



Erfahren Sie hier mehr über unsere Sicherheitsprodukte: [powerforsafety.com](https://www.powerforsafety.com)



Nadelstichverletzungen lassen sich mit Sicherheitsprodukten vermeiden. Schützen Sie sich!



Ein Schutzschild verwahrt
nach der Aktivierung die
Kanüle sicher und schützt so
vor Nadelstichverletzungen.



FÜR DIE TÄGLICHE BLUTENTNAHMEROUTINE

VACUETTE® QUICKSHIELD
Sicherheitsröhrchenhalter

Das ergonomische
Design des Halters
bietet den Fingern
einen guten Halt
bei der Punktion.

KEINE ÄNDERUNG DER ENTNAHMETECHNIK

Der VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter von Greiner Bio-One kann wahlweise mit VACUETTE® Mehrfachentnahmekanülen oder mit VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen verwendet werden. Bei unserem VACUETTE® QUICKSHIELD Complete und VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS sind bereits Kanülen vormontiert.


Das Schutzschild ist direkt am Halter befestigt. Durch

die einhändige Aktivierung des Schutzschildes unter Zuhilfenahme einer stabilen Auflagefläche oder des Fingers oder Daumens überzeugt das Produkt durch einfachste Handhabung bei weitreichendem Verletzungs- und Infektionsschutz.

Ohne Änderung der Entnahmetechnik bietet der VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter Schutz vor Nadelstichverletzungen.

SCHUTZSCHILD FÜR MEHR SICHERHEIT.

- / Keine Änderung der Entnahmetechnik.
- / Mehr Flexibilität in Bezug auf benutzer- und patientenspezifische Anforderungen durch das drehbare Schutzschild.
- / Aktivierung des Schutzschildes durch deutliches „Klicken“ hörbar und fühlbar.

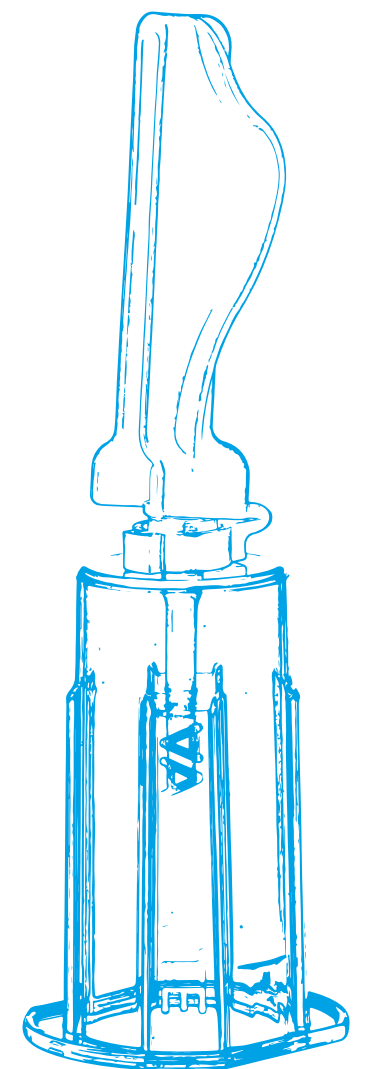

GANZ EINFACH
ZEIT SPAREN

mit bereits mit
vormontierter
VISIO PLUS Kanüle

DAS KOMBINIERTE PRODUKT

VACUETTE® QUICKSHIELD HALTER VORMONTIERT MIT DER KANÜLE

Als Kombinationsprodukt mit einer bereits vormontierten Kanüle kommt der Sicherheitsröhrchenhalter einzeln verpackt in steriler Blisterverpackung.

Schutzschild
kann beliebig in
jede Richtung
positioniert
werden

VACUETTE® QUICKSHIELD
Sicherheitsröhrchenhalter

entweder:
VACUETTE® QUICKSHIELD
Complete*

oder:
VACUETTE® QUICKSHIELD
Complete PLUS**

VISIO PLUS hat
ein transparentes
Kanülensichtfenster
für eine visuelle
Punktionskontrolle

* vormontiert
mit VACUETTE®
Mehrfachent-
nahmekanüle

** vormontiert mit
VACUETTE® VISIO
PLUS Kanüle


BITTE BEACH-
TEN SIE DIE
GEBRAUCHS-
ANWEISUNG
auf www.gbo.com

AKTIVIERUNG DES SICHERHEITSMECHANISMUS

Option 1



Option 2

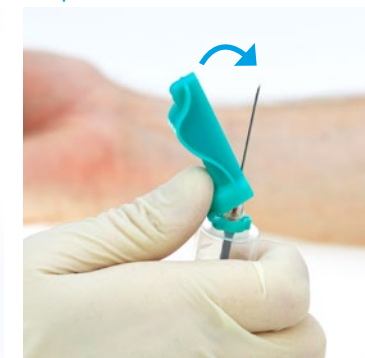

1

Aktivieren Sie
den Sicherheits-
mechanismus
**entweder auf
einer stabilen
Auflagefläche oder
mit dem Finger
oder Daumen.**

2

Sobald der Schild
sicher einrastet,
ist ein **Klicken** zu
hören.

MEHR SICHERHEIT

Sobald der Schild
eingerastet ist, ist
die Nadel sicher
und irreversibel
verschlossen.

Das ideale Einstiegsprodukt,
wenn es darum geht,
Nadelstichverletzungen
zu minimieren.



DER ERSTE SCHRITT ZUR SICHERHEIT

VACUETTE®

Sicherheitsset mit Flügeln

In der aktivierten
Position schützt der
Sicherheitsmechanis-
mus vor unbeabsich-
tigten Nadelstichen.

DAS RISIKO EINER NADELSTICHVERLETZUNG SENKEN

Bei dem VACUETTE® Sicherheitsset mit Flügeln handelt es sich um ein steriles, mit Kunststoffflügeln ausgestattetes Blutentnahmeset. Das Set besteht aus einer Edelstahlkanüle, nach Nadelstärke farb-codierten Flügeln, einem flexiblen Schlauch sowie einem Sicherheitsgehäuse aus Kunststoff.


Das Sicherheitsprodukt ohne Luer-Adapter und Halter eignet sich auch für den einmaligen

Gebrauch zur kurzzeitigen Infusion von intravenösen Flüssigkeiten.

Jedes Produkt ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, um das Risiko von Nadelstichverletzungen zu reduzieren. Nach Beendigung der Blutentnahme wird die Nadel vorsichtig aus der Vene des Patienten gezogen und der Sicherheitsmechanismus unmittelbar danach aktiviert.

ANGENEHME HANDHABUNG.

- / Flexible Flügel versprechen guten Halt auf der Haut des Patienten und eine bequeme Punktion.
- / Das transparente Design gewährt eine gute Visualisierung des Blutflusses.
- / Die Nadel ist dünnwandig und vorteilhaft für den Blutfluss.

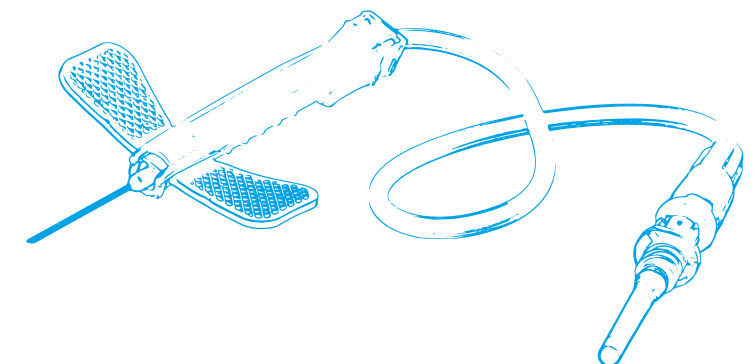

WAHLWEISE
ERHÄLTlich

mit oder ohne
vormontiertem
Halter

BITTE BEACH-
TEN SIE DIE
GEBRAUCHS-
ANWEISUNG
auf www.gbo.com

EINFACHES SICHERHEITSSYSTEM


VACUETTE® SICHERHEITSSET MIT FLÜGELN

Das VACUETTE® Sicherheitsset mit Flügeln ist mit Luer-Adapter oder mit einem vormontierten Halter, in den Nadelstärken von 21, 23 oder 25 G sowie mit einer Schlauchlänge von 18 oder 30 cm erhältlich.


Ohne Latex und DEHP hergestellt

Die Nadel
ist dünn-
wandig
und vor-
teilhaft
für den
Blutfluss

Transparentes
Design gewährt eine
gute Visualisierung
des Blutflusses

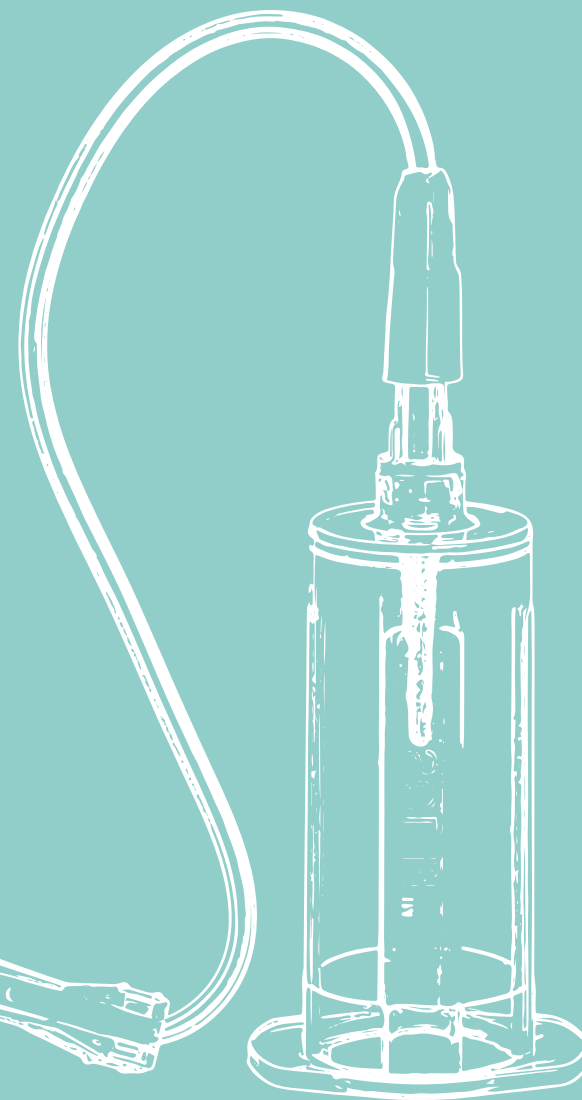


DREI MÖGLICHKEITEN FÜR DIE AKTIVIERUNG DES SICHERHEITSMECHANISMUS

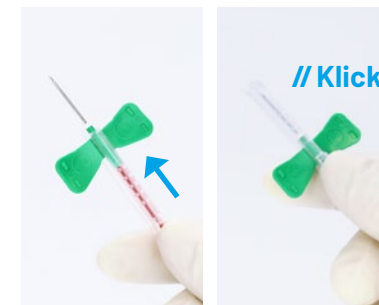


Einhändige Aktivierung

Nach Gebrauch **halten Sie den Schlauch und schieben das Schutzgehäuse** aus Kunststoff mit derselben Hand **über die Nadel**.

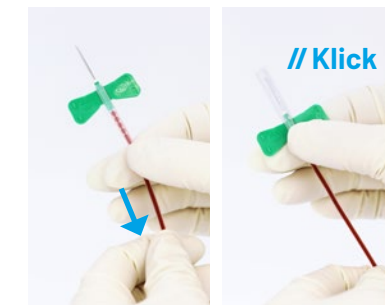

Zweihändige Aktivierung


Nach Gebrauch **ziehen Sie den Schlauch zurück**, während Sie **das Schutzgehäuse am Griff festhalten** (verbreiterter Teil des Plastikgehäuses) bis die Nadel eingeschlossen ist.

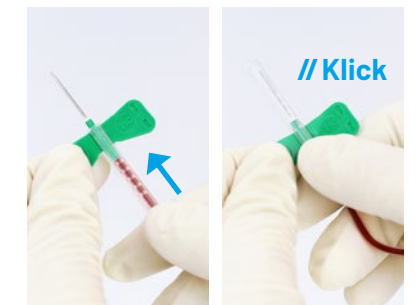

Zweihändige Aktivierung

Nach Gebrauch **halten Sie die Flügel mit der einen Hand fest und schieben das Schutzgehäuse** am Griff (verbreiterter Teil des Plastikgehäuses) mit der anderen Hand **über die Nadel**.

Das Sicherheitsblutentnahmeset
bietet dem Patienten einen
besonders sanften
Abnahmekomfort.

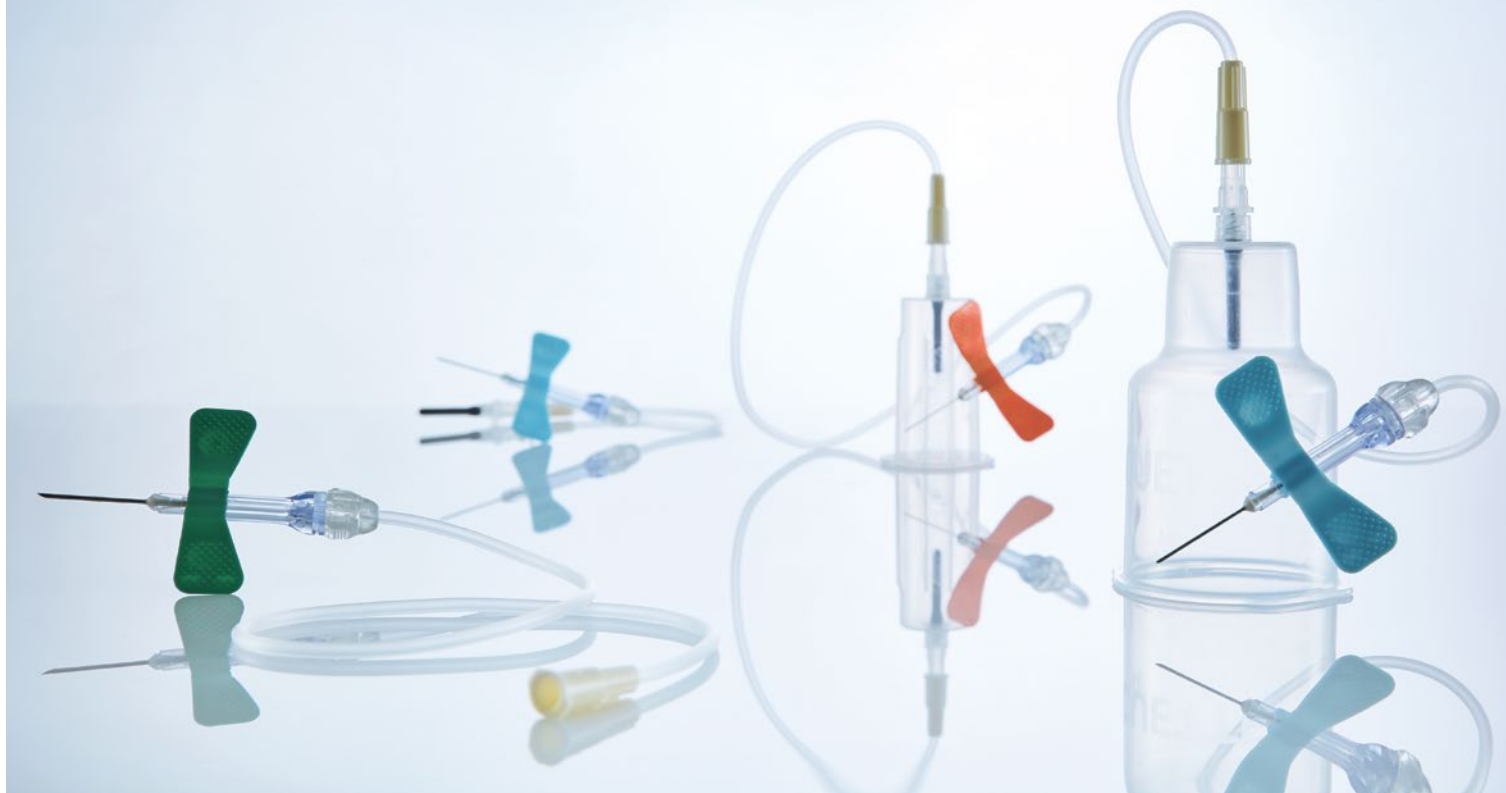

NICHT NUR BEI SCHWIERIGEN VENENVERHÄLTNISSEN

SICHERHEITS- Blutentnahmeset

Das ergonomische
Produkt ist einzeln
verpackt. Es lässt
sich leicht öffnen
und verursacht
wenig Müll.

EIN HOHES MASS AN SICHERHEIT


Das Produkt bietet ein hohes Maß an Sicherheit durch die manuelle Aktivierung des Schutzmechanismus noch während sich die Kanüle innerhalb der Vene befindet. Die korrekte Aktivierung durch den Anwender wird durch ein deutlich hörbares Klicken angezeigt. Das Sicherheitsblutentnahmeset schützt so bestmöglich vor Nadelstichverletzungen. Die visuelle Kontrolle der erfolgten Punktion

durch ein transparentes Sichtfenster erhöht außerdem die Punktionssicherheit und kann für eine Blutentnahme oder für Infusionen für bis zu fünf Stunden eingesetzt werden.*

Das Sicherheitsblutentnahmeset ist eine sterile, zum einmaligen Gebrauch bestimmte Flügelkanüle, verbunden mit einem flexiblen Schlauch, mit oder ohne einem Luer-Adapter oder Luer-Adapter mit Halter.

INTUITIVES PRODUKTDESIGN.

- / Ein Sichtfenster zwischen Nadel und Schlauch hilft beim Erkennen, ob die Punktion erfolgreich war.
- / Schlauch mit unterschiedlichen Längen bietet mehr Flexibilität bei der Blutentnahme.
- / Einfaches Auslösen des Sicherheitsmechanismus.

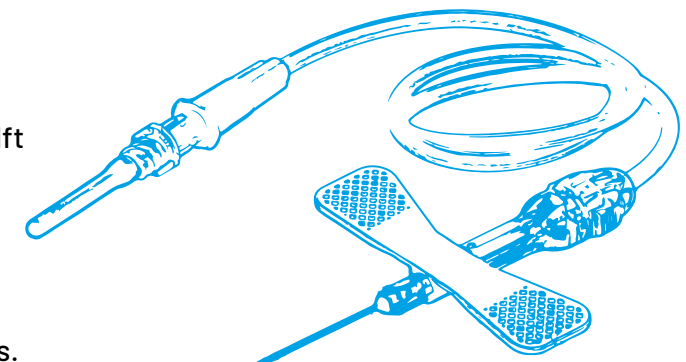

**VIELSEITIG
EINSETZBAR**

für eine
Blutentnahme oder
für Infusionen*
(bis zu 5 Stunden)

**BITTE BEACH-
TEN SIE DIE
GEBRAUCHS-
ANWEISUNG**
auf www.gbo.com

VIER PRODUKTvariationen


SICHERHEITSBLUTENTNAHMESET

Als praktisches Kombiprodukt erhalten Sie das Sicherheitsblutentnahmeset wahlweise als Infusionsset oder bereits vormontiert mit Luer Adapter, Halter oder Blutkulturhalter in unterschiedlichen Nadelstärken sowie Schlauchlängen.

Vormontierte
Kombiprodukte in steriler
Blisterverpackung

Schlauch mit unterschiedlichen
Längen bietet mehr Flexibilität
bei der Blutentnahme

Ein Sichtfenster zwischen
Nadel und Schlauch lässt
erkennen, ob die Punktion
erfolgreich war

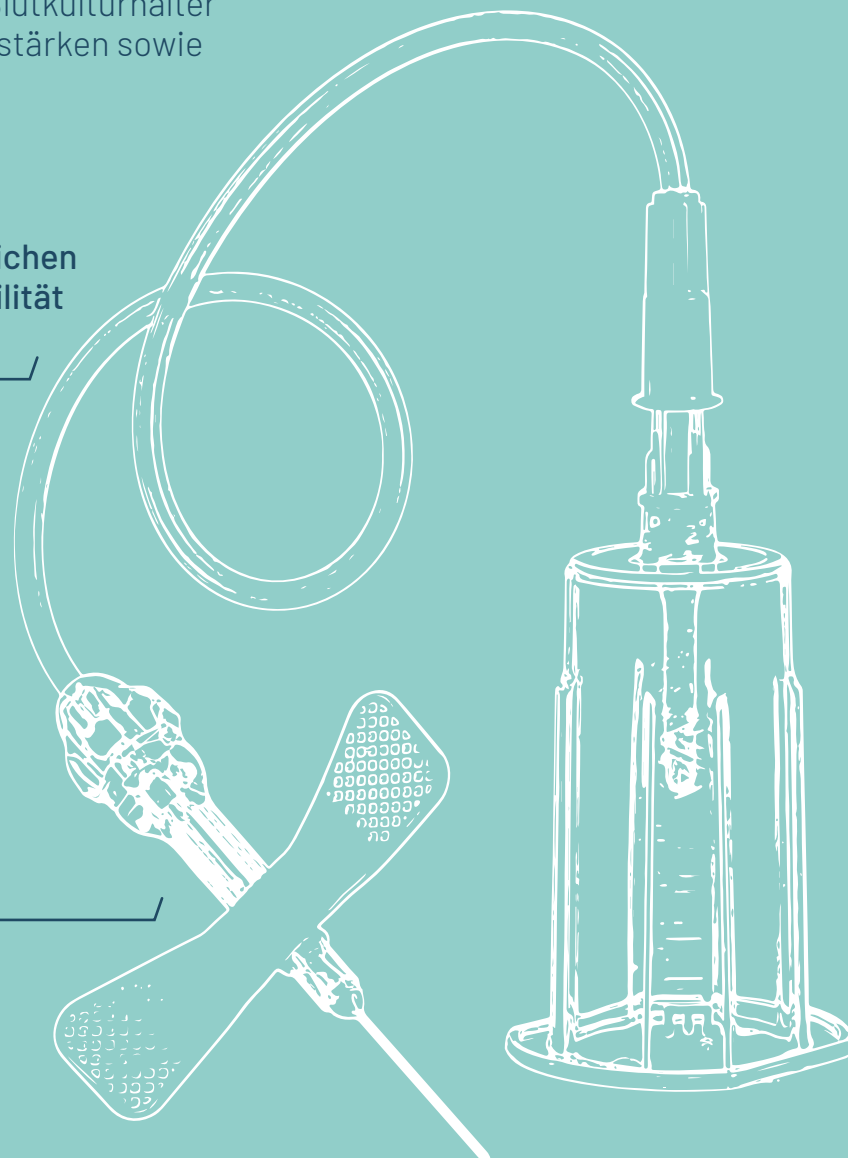

EINFACHES AUSLÖSEN DES SICHERHEITSMechanismus



1

Lösen Sie den
Sicherheitsmechanismus
durch **leichten Druck auf
die beiden Seitenteile des
Schiebers**.



2


Ziehen Sie anschließend den
hellen Bereich nach hinten.
Die vollständige Aktivierung
ist durch ein deutliches
Klicken hörbar.



MEHR SICHERHEIT

Die Nadel ist sicher
und irreversibel im
Gehäuse verschlossen
- für maximale
Sicherheit.

Die nächste Evolutionsstufe
bei der Blutentnahme.

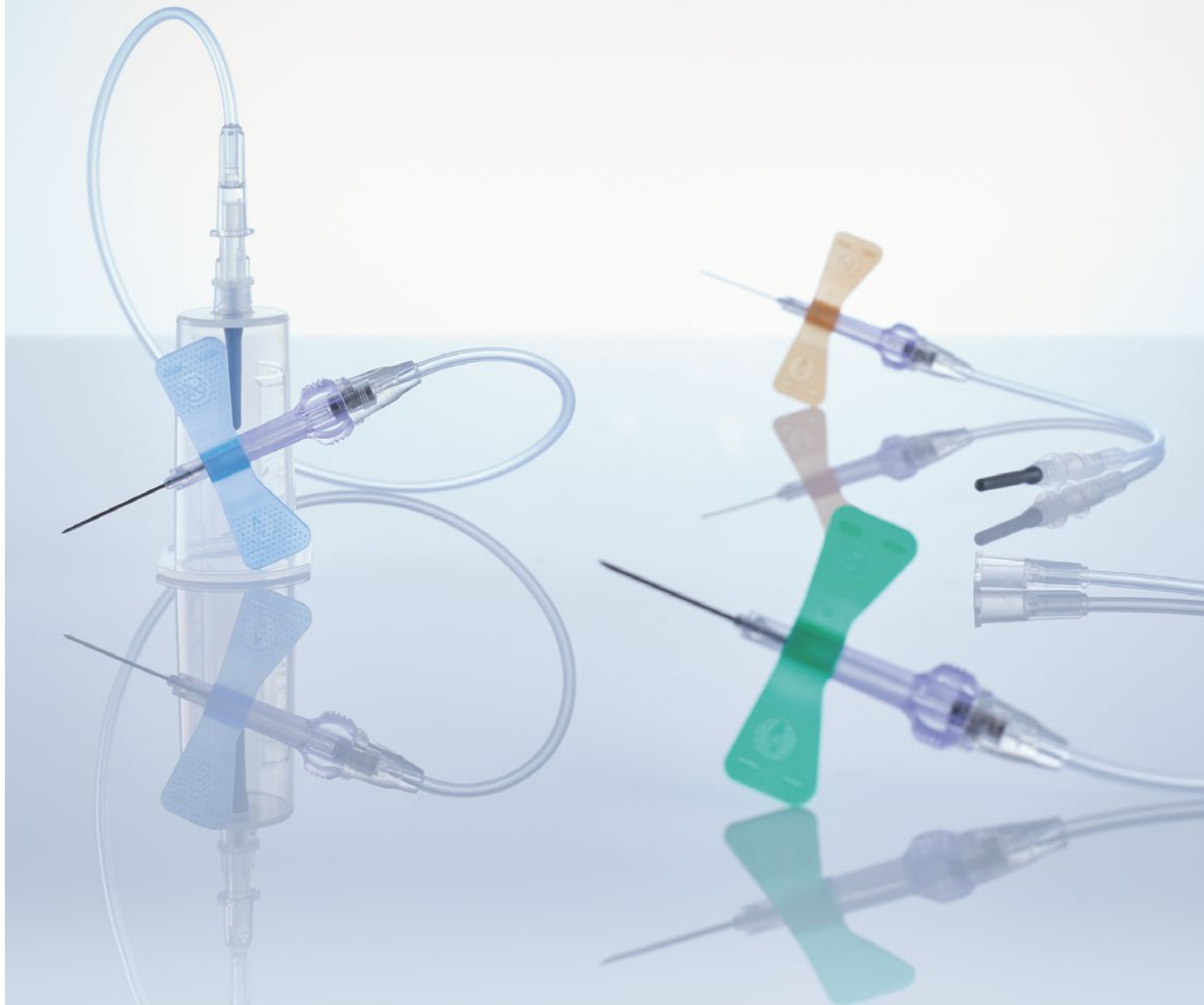

DER SANFTE WEG

VACUETTE® EVOPROTECT
Sicherheitsblutentnahmeset

Das Produkt
darf für eine
Blutentnahme und
eine anschließende
Kurzzeitinfusion für
bis zu 4 Stunden
verwendet werden.

BLUTENTNAHME IN EINER GANZ NEUEN DIMENSION

Der halbautomatische Feder-Mechanismus schützt Sie vor dem Risiko einer Nadelstichverletzung und erleichtert Ihren Arbeitsalltag. Denn jede Stichverletzung ist eine zu viel.


Das VACUETTE® EVOPROTECT Sicherheitsblutentnahmeset zeichnet sich durch eine besonders bequeme und intuitive Handhabung aus. Es besteht aus einer Flügelkanüle mit einem Sicherheitsmechanismus, der durch das

spezielle Design für die einhändige Aktivierung geeignet ist. Durch Aktivierung des Sicherheitsmechanismus, wenn die Nadel noch in der Vene ist, werden Nadelstichverletzungen weitgehend eliminiert.

Extra dünne Nadelwände der 21G und 23G Kanülen wirken sich positiv auf die Durchflussrate und damit auch auf die Dauer der Blutentnahme und Infusion aus.

HALBAUTOMATISCHER SICHERHEITSMECHANISMUS.

- / Ein deutlich hörbares Klicken bestätigt die erfolgreiche Aktivierung.
- / Die Nadel wird zurückgezogen und gleichzeitig sicher und irreversibel im Gehäuse des Produktes verschlossen.

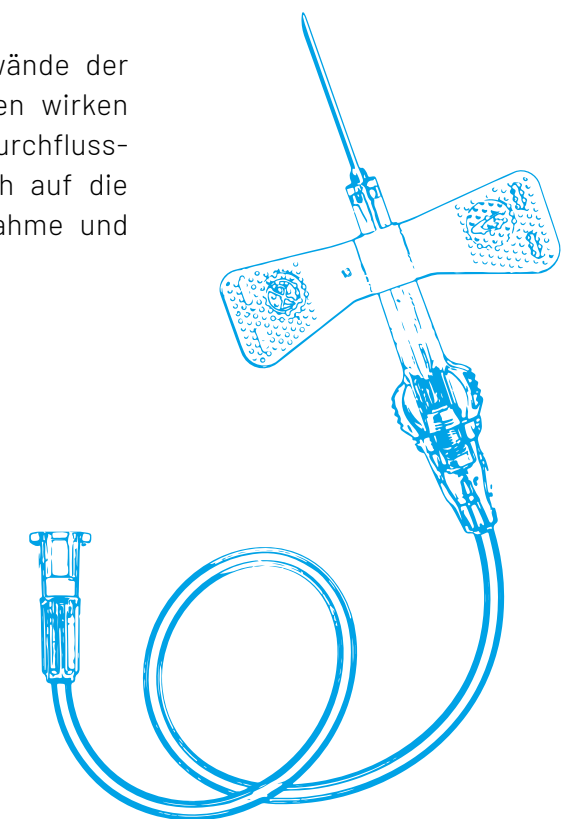


ANWENDER-
FREUNDLICH

dank optimalem
Design für intuitive
Handhabung

DIE NÄCHSTE EVOLUTIONSSTUFE

VACUETTE® EVOPROTECT


Die Auslöser des patentierten halbautomatischen Sicherheitsmechanismus befinden sich seitlich am Produkt, um eine einhändige und möglichst patientenschonende Aktivierung des Mechanismus zu ermöglichen.

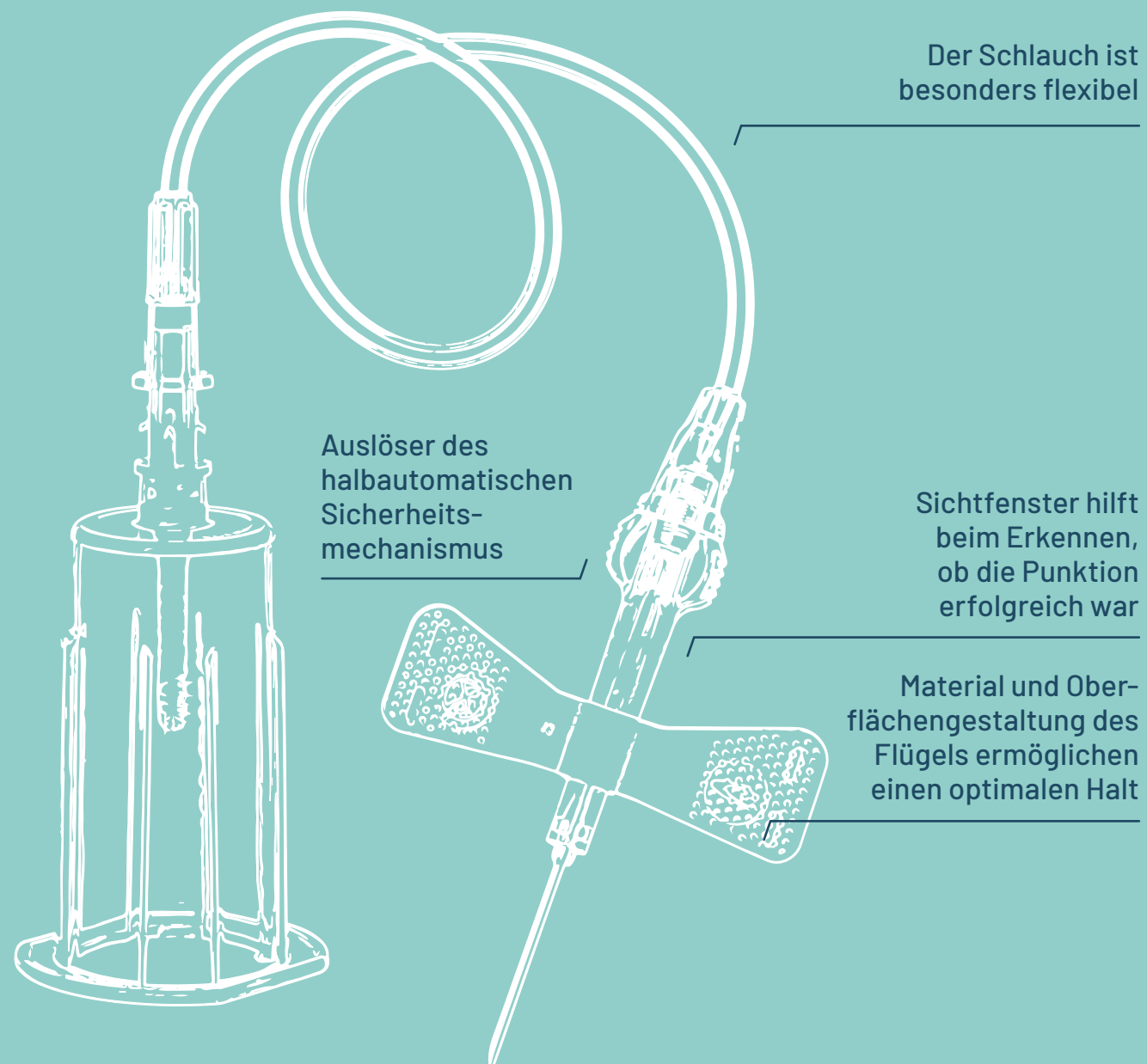


BITTE BEACH-
TEN SIE DIE
GEBRAUCHS-
ANWEISUNG

auf www.gbo.com

MAXIMALE SICHERHEIT BEI DER ANWENDUNG

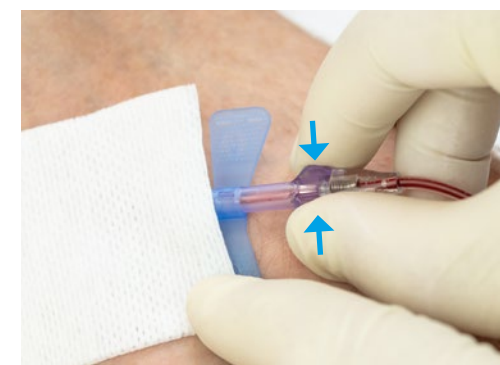

Aktivieren Sie den Sicherheitsmechanismus mit einer Hand durch **Drücken der blauen Auslöseknöpfe**. Achten Sie darauf, die automatische Rückführung nicht zu behindern.

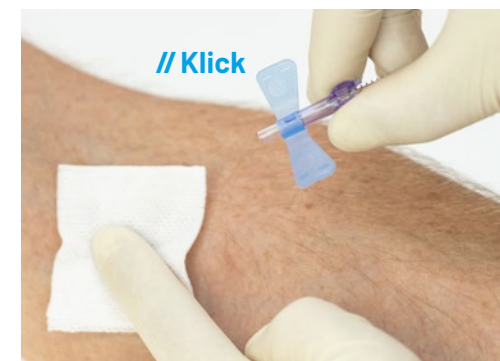

Nachdem sich die Nadel automatisch zurückgezogen hat, ist ein **Klicken** zu hören. Dies ist das Zeichen für eine korrekte und erfolgreiche Aktivierung des Sicherheitsmechanismus.



DER FEDER-MECHANISMUS

ermöglicht eine halbautomatische Aktivierung während sich die Nadel noch in der Vene des Patienten befindet.



SICHERHEIT FÜR JEDES LEVEL

In unserem Sortiment finden Sie das passende Produkt für jedes Sicherheitslevel. Von Einstiegsprodukten bis hin zu Premium Sicherheitsprodukten mit halbautomatischem Sicherheitsmechanismus.



PERSÖNLICHE BERATUNG

Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie gerne jederzeit bei Fragen zu unseren Produkten und deren Anwendung. Gemeinsam finden Sie das richtige Produkt für Ihre individuellen Bedürfnisse.



SCHULUNGSMÖGLICHKEITEN

Für den richtigen Umgang mit unseren Produkten bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Schulungsmöglichkeiten an. Persönlich oder virtuell mit unseren Anwendungsexperten oder in Webinaren oder eLearning Kursen online auf unserer Website.

PRODUKTÜBERSICHT

VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter

Art. Nr.	Stück UVP / VP
450230	50 / 1.000

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadellänge	Nadelwandtyp	Stück UVP / VP
450238V1	● grün	21 G	1 "	25 mm	dünnwandig	30 / 360
450237V1	● grün	21 G	1,5 "	38 mm	dünnwandig	30 / 360

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadellänge	Nadelwandtyp	Stück UVP / VP
450235V1	● grün	21 G	1 "	25 mm	dünnwandig	30 / 360
450239V1	● grün	21 G	1,5 "	38 mm	dünnwandig	30 / 360
450226V1	● schwarz	22 G	1 "	25 mm	dünnwandig	30 / 360
450228V1	● schwarz	22 G	1,5 "	38 mm	dünnwandig	30 / 360

VACUETTE® Sicherheitsblutentnahme-/infusionssets mit Flügeln

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
451091	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	7 "	18 cm	50 / 200
451092	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	7 "	18 cm	50 / 200

Bei diesem Produkt fallen möglicherweise Mindestbestellmengen und längere Vorlaufzeiten an.

VACUETTE® Sicherheitssets mit Flügeln + Luer Adapter

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
451081	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	7 "	18 cm	50 / 200
451082	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	7 "	18 cm	50 / 200
451090	● orange	25 G	19 mm	dünnwandig	7 "	18 cm	50 / 200
451095	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	50 / 200
451096	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	50 / 200
451099	● orange	25 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	50 / 200

Bei diesem Produkt fallen möglicherweise Mindestbestellmengen und längere Vorlaufzeiten an.

VACUETTE® Sicherheitssets mit Flügeln + Halter

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
451085	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	7 "	18 cm	25 / 200
451086	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	7 "	18 cm	25 / 200
451160	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	25 / 200
451161	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	25 / 200

Bei diesem Produkt fallen möglicherweise Mindestbestellmengen und längere Vorlaufzeiten an.

Sicherheitsblutentnahme- / infusionssets

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
450091	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	7,5 "	19 cm	50 / 1.000
450191	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	50 / 1.000
450092	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	7,5 "	19 cm	50 / 1.000
450090	● orange	25 G	19 mm	dünnwandig	7,5 "	19 cm	50 / 1.000

Sicherheitsblutentnahmesets + Luer Adapter

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
450083	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	4 "	10 cm	50 / 1.000
450081	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	7,5 "	19 cm	50 / 1.000
450095	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	50 / 1.000
450084	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	4 "	10 cm	50 / 1.000
450082	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	7,5 "	19 cm	50 / 1.000
450096	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	50 / 1.000
450099	● orange	25 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	50 / 1.000

Sicherheitsblutentnahmesets + Halter

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
450087	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	4 "	10 cm	24 / 240
450085	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	7,5 "	19 cm	24 / 240
450160	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	24 / 240
450088	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	4 "	10 cm	24 / 240
450086	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	7,5 "	19 cm	24 / 240
450161	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	24 / 240

Sicherheitsblutentnahmesets + Blutkulturhalter

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
450182	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	7,5 "	19 cm	24 / 240
450183	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	7,5 "	19 cm	24 / 240
450184	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	24 / 240
450185	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	24 / 240

VACUETTE® EVOPROTECT Sicherheitsblutentnahme- / infusionssets

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
450120	● grün	21 G	19 mm	extra dünnwandig	7,5 "	19 cm	60 / 1.080
450121	● blau	23 G	19 mm	extra dünnwandig	7,5 "	19 cm	60 / 1.080

VACUETTE® EVOPROTECT Sicherheitsblutentnahmesets + Luer Adapter

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
450127	● grün	21 G	19 mm	extra dünnwandig	7,5 "	19 cm	60 / 1.080
450128	● grün	21 G	19 mm	extra dünnwandig	12 "	30 cm	60 / 1.080
450129	● blau	23 G	19 mm	extra dünnwandig	7,5 "	19 cm	60 / 1.080
450130	● blau	23 G	19 mm	extra dünnwandig	23 "	30 cm	60 / 1.080
450132	● orange	25 G	19 mm	dünnwandig	12 "	30 cm	60 / 1.080

VACUETTE® EVOPROTECT Sicherheitsblutentnahmesets + Halter

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
450122	● grün	21 G	19 mm	extra dünnwandig	7,5 "	19 cm	30 / 540
450123	● grün	21 G	19 mm	extra dünnwandig	12 "	30 cm	30 / 540
450125	● blau	23 G	19 mm	extra dünnwandig	7,5 "	19 cm	30 / 540
450126	● blau	23 G	19 mm	extra dünnwandig	12 "	30 cm	30 / 540

making a difference

www.gbo.com

GREINER BIO-ONE GMBH
KREMSMÜNSTER, AUSTRIA

PHONE +43 7583 6791-0
FAX +43 7583 6318
E-MAIL office@at.gbo.com



GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER.
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR
LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.



Diese Produktinformationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal. Produkte von Greiner Bio-One dürfen nur von entsprechend geschultem medizinischem Fachpersonal in Übereinstimmung mit der entsprechenden Gebrauchsanweisung (IFU) verwendet werden. Eine Auflistung der Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung, die jedem Produkt beiliegt oder zum Download auf unserer Webseite www.gbo.com (Download Center) abrufbar ist. Für weiterführende Informationen wenden Sie sich an Ihren lokalen Greiner Bio-One Vertriebspartner oder besuchen Sie unsere Website.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung, Gewährleistung oder Garantie der Greiner Bio-One GmbH ist ausgeschlossen. Alle Rechte, Irrtum und Änderungen sind vorbehalten. Sofern nicht anders angeführt, verfügt Greiner Bio-One GmbH über alle Urheberrechte und/oder sonstigen (Verwendungs-)Rechte in den vorliegenden Unterlagen, insbesondere an Kennzeichen, wie an angeführten (Wort-Bild-)Marken, Logos. Eine Verwendung, Vervielfältigung oder jeder sonstige Gebrauch der Rechte der Greiner Bio-One GmbH ist ausdrücklich untersagt.
Medieninhaber: Greiner Bio-One GmbH / **Hersteller:** [Samson Druck GmbH / 5581 St. Margarethen]

980153 de [rev.08 03.2021]


greiner
BIO-ONE